

БИБЛ

Двухкомпонентное дезинфицирующее средство в виде сыпучего непылящего порошка на основе активного кислорода для ДВУ и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, а также для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения



- быстрорастворимый порошок в сравнении с порошками на основе перкарбоната и пербората натрия
- имеет полный спектр антимикробной активности, включая *Mycobacterium terrae*, обладает спороцидным действием
- pH водных растворов от 6 до 8
- обладает эффективными и экономичными режимами применения при дезинфекции и стерилизации

БИБЛ



Двухкомпонентное дезинфицирующее средство в виде сыпучего непылящего порошка на основе активного кислорода для ДВУ и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, а также для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

Характеристики:

Средство состоит из Компонента 1 в виде белого гранулированного порошка и Компонента 2 – порошка из белых и голубых гранул. Использование пероксигидрата мочевины в качестве твердого источника активного кислорода и тетраацетилэтилендиамина как активатора позволяет достигнуть быстрого растворения порошка при приготовлении рабочих растворов и их максимальной эффективности. Средство и его рабочие растворы не обладают сенсibiliзирующим (аллергенным) действием.

Назначение:

- Дезинфекция, в том числе совмещенная с предстерилизационной очисткой (ПСО), и ПСО, не совмещенная с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) ручным способом;
- Дезинфекция, в том числе совмещенная с ПСО, и ПСО, не совмещенная с дезинфекцией, хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов из металлов в ультразвуковой установке УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и установках типа «Нугеа» механизированным способом;
- Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;
- Стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов.

Антимикробная активность:

Грамположительные и грамотрицательные бактерии (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*), вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтереальных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. H5N1, H1N1, аденовирусов и других возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, Трихофитон, обладает спороцидным действием.

Режимы применения

Дезинфекция, совмещенная с ПСО при вирусных, бактериальных и грибковых (кандидозы) инфекциях и дерматофитиях:

- Изделий медицинского назначения, хирургических и стоматологических инструментов, в том числе вращающихся:
 - 1.0% рабочий раствор при экспозиции 15 мин., исключая туберкулез;
 - 2% рабочий раствор при экспозиции 30 мин., включая туберкулез (тестировано на *Mycobacterium terrae*).
- Изделий медицинского назначения при погружении в ультразвуковые установки типа УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Нугеа»:

- 1% рабочий раствор при экспозиции 10 мин., исключая туберкулеза;
- 2% рабочий раствор при экспозиции 45 мин., включая туберкулез.

Жестких и гибких эндоскопов:

- 0,5% рабочий раствор при экспозиции 15 мин. или 1% рабочий раствор при экспозиции 5 мин., исключая туберкулез;
- 2% рабочий раствор при экспозиции 30 мин. или 3% рабочий раствор при экспозиции 15 мин., включая туберкулез.

Дезинфекция высокого уровня (ДВУ):

- 2,0% рабочий раствор при экспозиции 30 мин., 3,0% рабочий раствор при экспозиции 15 мин. и 5,0% рабочий раствор при экспозиции 5 мин.

Стерилизация изделий медицинского назначения из различных материалов, включая жесткие и гибкие эндоскопы:

- 2% раствор при экспозиции 90 мин.
- 3% раствор при экспозиции 60 мин.
- 5% раствор при экспозиции 30 мин.

Состав:

Пероксигидрат мочевины, тетраацетилэтилендиамин функциональные добавки (ПАВ), стабилизирующие и антикоррозионные добавки.

Срок годности:

в не вскрытой упаковке производителя – 3 года, в смесовой форме – 1 месяц, рабочих растворов – 2 суток.

Форма выпуска:

полимерные емкости от 0,5 кг и в пакетах из металлизированной полимерной пленки массой 50, 100 и 200 г.