# ТРИЛОКС УНИВЕРСАЛ

Обработка кожных покровов, очистка и дезинфекция поверхностей, изделий медицинского назначения






# Салфетки на этиловом спирте!



- эффективны в отношении Mycobacterium terrae;
- разрушают на поверхности биологические пленки;
- не оставляют остаточной пленки на обработанной поверхности;
- совместимы с материалами медицинского оборудования и различными поверхностями.
- размер салфеток 130 × 180 (±10).

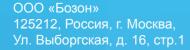

Тел/факс: +7(495) 937-33-97/98

E-mail: info@bozon.ru www.bozon.ru



# МЕДИЦИНСКИЕ АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ

# ТРИЛОКС УНИВЕРСАЛ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА



# Обработка кожных покровов, очистка и дезинфекция поверхностей, изделий медицинского назначения

## Режимы применения:

- Гигиеническая обработка рук: время обработки 20 сек. Для профилактики туберкулеза и вирусных инфекций дважды, используя каждый раз новую салфетку, общее время обработки не менее 1 мин.
- Обработка кожи локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов: кожу двукратно протирают двумя разными салфетками. Время выдержки после окончания обработки 2 мин.
- Обработка инъекционного поля: кожу однократно протирают одной салфеткой время выдержки после окончания обработки – 20 сек
- Обработка ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний: время обработки каждой ступни не менее 30 сек.
- Обработка нестерильных перчаток, надетых на руки персонала:1 этап обрабатывают дважды раздельными салфетками, время экспозиции 5 мин. 2 этап при видимых загрязнениях проводят предварительную очистку раздельными салфетками и обработку перчаток вторыми раздельными салфетками. Общее время экспозиции не менее 5 минут.
- Очистка и дезинфекция медицинских изделий: проводится способом двукратного протирания разными салфетками с экспозиционной выдержкой 5 мин.
- Поверхности и предметы, не загрязненные биологическими выделениями: после первого протирания двукратно разными салфетками при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях дать поверхности высохнуть, а затем обработать второй салфеткой с дезинфекционной экспозицией не менее 5 мин.
- Поверхности и предметы, загрязненные биологическими выделениями: 1-й этап: протереть поверхность салфеткой для удаления грязи и биологических загрязнений (пленок). 2-й этап: поверхность тщательно протереть новой салфеткой, дезинфекционная экспозиция не менее 5 мин.
- Дезинфекция внутренней поверхности обуви, резиновых, пластиковых и полипропиленовых ковриков. Коврики протереть салфетками с дезинфекционной экспозицией 5 мин. Внутреннюю поверхность обуви протереть салфетками, используя на одну пару две салфетки с экспозицией не менее 5 мин.

# Характеристики:

Готовые к применению влажные спиртовые салфетки на этиловом спирте для обработки кожных покровов,очистки и дезинфекции небольших по площади поверхностей. Салфетки «Трилокс универсал» активно разрушают на поверхностях биологические пленки.

Обладают хорошими моющими и дезодорирующими свойствами.

Не оставляют остаточной пленки на обработанной поверхности (не требуют смывания средства после обработки).

Совместимы с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спиртов).

## Антимикробная активность:

обладают антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза (тестировано на микобактериях терра), кишечных инфекций, вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, грипп, в том числе H1N1 и H5N1, герпес, полиомиелит, энтеральные и парентеральные гепатиты, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов рода Кандида, Трихофитон.

#### Назначение:

- для гигиенической обработки рук медицинского персонала в ЛПУ, в том числе персонала машин скорой медицинской помощи, соответствующих подразделений МЧС, персонала стоматологических клиник и отделений, акушерских стационаров, отделений неонатологии;
- для обработки кожи инъекционного поля;
- для обработки локтевых сгибов доноров в ЛПУ, на станциях переливания крови;
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов;
- для обеззараживания медицинских перчаток;
- для очистки и дезинфекции изделий медицинского назначения:
- для очистки и дезинфекции небольших по площади твердых поверхностей.

### Состав:


этиловый спирт – 60-65%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид – 0,25%, ЧАС – 0,2% и феноксиэтанол 1,0%.

## Срок годности:

салфетки в банке - 5 лет, салфетки в пакетах - 30 месяцев в герметично закрытой упаковке производителя.

#### Форма выпуска:

банка (60, 90 шт.), индивидуальная упаковка (саше) в картонной коробке - 400 шт.

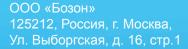

Тел/факс: +7(495) 937-33-97/98 E-mail: info@bozon.ru www.bozon.ru

